



株式会社 **アペル**

**APEL Total Bilirubin Meter
MADE IN JAPAN**

BR-502

新生児用総ビリルビンメーター

二波長式
新生児用
総ビリルビン値測定器



操作はとても簡単

電源を入れてから
わずか2分で使用可能

素早い測定時間

測定時間は最大1秒です。

ランプ交換不要

BR-502 光源にLEDの採用で長寿命の為、ランプ交換が不要です。

軽量

BR-502は小型でわずか1.1kgと軽量です。

BR-502は定期的な標準液での校正により日々の校正には標準液は不要です



*但し、電源ON後に蒸留水入り毛細管で毎回オートゼロを行う必要があります。




BR-502

新生児用総ビリルビンメーター




二波長式
新生児用
総ビリルビン値測定器

測定準備:

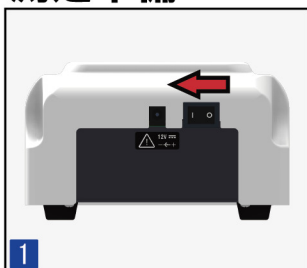


1 背面の電源スイッチをONします。

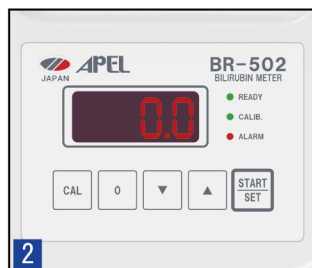

2 ウォーミングアップ(2分)終了後に蒸留水入りの毛細管を入れてゼロをとります。



3 検体の入った毛細管を測定槽に挿入します。

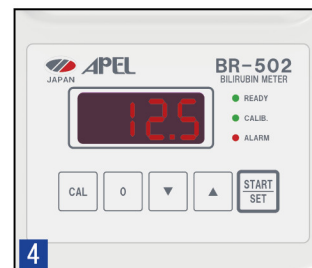

4 直ちに測定値が表示されます。

製品仕様:

測定方式	2波長
測定範囲	0~30mg/dL(総ビリルビン)
妨害成分補正	Hb換算 0~250 mg/dL
測定精度	±5%
サンプル量	50~60 μL
表示器	3-1/2桁(7セグメント)LED
測定管	ハマトクリット毛細管
光源	高輝度LED
受光体	高感度シリコンフォトセル
電源	最大2W
寸法	150(W) X 225(D) X 90(H) mm
重量	1.1kg(本体)

*仕様及びデザインは改良の為予告なく変更することがございます。

標準付属品:

毛細管(ヘパリン処理)	1ケース(100本)
毛細管(プレーン)	1ケース(100本)
毛細管パテ	1枚
ビリルビン標準液(ABY)	2本
専用ACアダプター	1式
取扱説明書	1冊

日本製



株式会社 **アペル**

Website

<http://www.apel.co.jp>

代理店